

Co-Plus® LF

Bandagem elástica autoaderente multiuso




- Antialérgico
- Fácil aplicação e remoção



BSNmedical

Co-Plus® LF

Co-Plus® LF é uma bandagem elástica autoaderente **multiuso, altamente versátil e fácil de usar.**

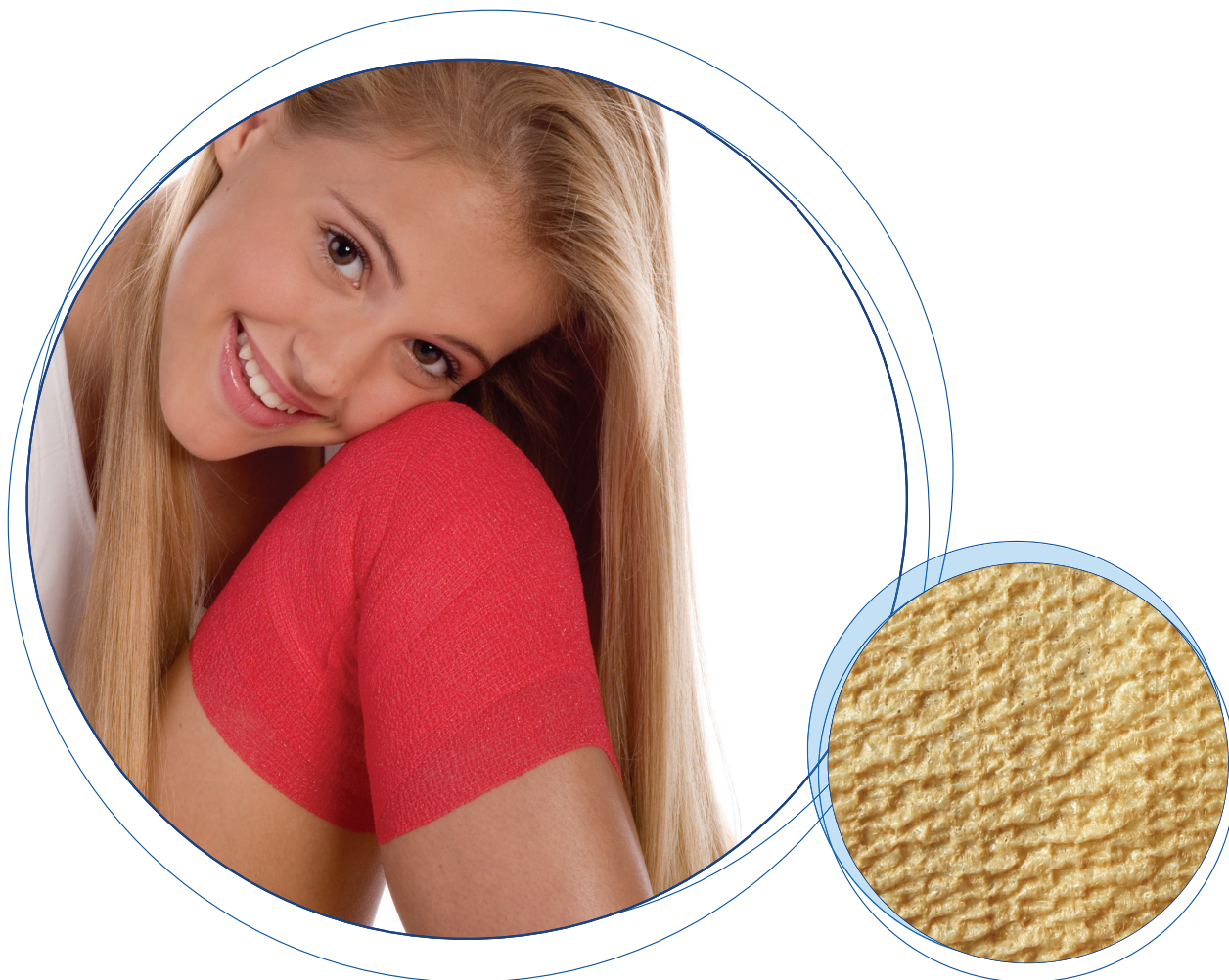

- Fácil de cortar, **não necessita de tesoura.**
- Co-Plus® LF adere a ele mesmo e não à pele ou à roupa, fazendo com que a bandagem seja de **fácil aplicação e remoção, sem dor ou esforço.**
- Co-Plus® LF é muito flexível e **se adapta a todos os contornos do corpo.**
- Sua estrutura porosa **permite à pele transpirar.**
- Disponível em uma grande variedade de cores, Co-Plus® LF é, além de funcional, moderno e original.

Indicações



Enfaixamento e compressão em lesões.



Profilaxia contra lesões esportivas.



Fixação de curativos, inclusive em regiões de aplicação complicada, como cabeça e dedos.




Fixação de talas e bolsas de água quente/fria.



Ideal para peles delicadas, como a dos idosos.

Aplicação

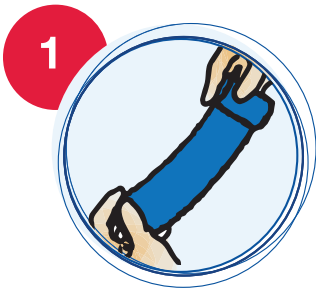

- 1.** Desenrole a quantidade que você necessita e solte para que a bandagem fique no seu tamanho em repouso;
- 2.** Sem esticar a bandagem, aplique a primeira camada, dando uma volta completa. Pressione levemente o local para manter o início da bandagem no lugar;
- 3.** Continue a aplicação colocando tensão na bandagem para obter a compressão desejada;
- 4.** Corte a bandagem e finalize a aplicação pressionando levemente o final da bandagem sobre si mesma (Co-plus® LF pode ser cortado com as mãos, dispensando o uso de tesoura).

Diferenciais

- ✓ Mantém compressão ao longo do tempo;
- ✓ Adere sobre si mesmo sem necessidade de grampos ou fitas adesivas;
- ✓ Adapta-se instantaneamente a todos os contornos do corpo;
- ✓ Não adere à pele, cabelo, roupas, lençóis etc.;
- ✓ Fácil de usar, aplicar, reposicionar ou remover;
- ✓ Livre de látex, não causa alergia.



Informações para pedidos

Código de produto	Tamanho	Conteúdo da embalagem
B72100-14	2,5 cm X 2 m, cor da pele	60 Bandagens
B72100-16	5 cm X 2 m, cor da pele	36 Bandagens
B72100-17	7,5 cm X 2 m, cor da pele	24 Bandagens
B72100-18	10 cm X 2 m, cor da pele	18 Bandagens
B72100-19	15 cm X 2 m, cor da pele	12 Bandagens
B72100-20	7,5 cm X 2 m, rosa, azul, azul claro, verde, vermelho, roxo	24 Bandagens
B72100-21	10 cm X 2 m, rosa, azul, azul claro, verde, vermelho, roxo	18 Bandagens



Neve Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
R. Julio Parigot, 525/535 Vila Antonieta, São Paulo-SP, CEP 03478-007
SAC Neve: 0800 70 45415 sac@bsnmedical.com Telefone Comercial: 11 2141 8100

www.neveline.com.br www.bsnmedical.com