

ATRAUMAN AG



Descrição

Atrauman Ag é uma cobertura não aderente revestida em prata, que possui ação antimicrobiana e está impregnada com uma substância neutra à base de triglicerídeos de cadeia média.

Composta por material fino, macio e maleável, que garante um bom contato com o leito da ferida e impede que a cobertura faça aderência à ferida e consequentemente sua remoção é atraumática.

Mecanismo de Ação

As bactérias são destruídas na superfície da cobertura devido aos ions de prata que se formam no ambiente úmido. O Atrauman Ag é eficaz contra bactérias gram-negativas (por exemplo, *Klebsiella pneumoniae*) bem como bactérias gram-positivas (por exemplo, *Staphylococcus aureus* incluindo as cepas MRSA).

A substância neutra protege as bordas da ferida e previne a maceração, sem deixar resíduos durante as trocas. Atrauman Ag não provoca descoloração no leito da ferida.

Composição

Filamentos de poliamida, prata metálica.

A substância contém (em conformidade com a denominação INCI): Caprylic/Capric/Stearic Triglyceride; Bis-diglycerol polyacryladipate-2 e Macrogol 2000.

Indicação

O Atrauman Ag é indicado para o uso complementar no tratamento de feridas infectadas ou com colonização crítica e também indicado como tratamento profilático em infecção de feridas.

O Atrauman Ag é indicado para o tratamento de feridas agudas e crônicas, podendo ser associado com a Terapia de Feridas por Pressão Negativa Vivano.

Instruções de uso

Retirar o Atrauman Ag da embalagem com ambas as películas de proteção. Remover a película de um dos lados, aplicar esse mesmo lado sobre a ferida e em seguida remover a outra película. Para absorver o exsudato da ferida, deverá utilizar um curativo absorvente estéril por cima do Atrauman Ag.

Quando associado com o Vivano, o Atrauman Ag deve ser aplicado diretamente no leito da ferida.

Tempo de troca

Pode permanecer no leito da ferida por até 7 dias.

Contra Indicação

Não deverá ser utilizado em pacientes com hipersensibilidade a um dos seus componentes.

Precauções

O tratamento com Atrauman Ag não substitui a terapia com antibióticos, quando necessária, sendo importante haver a avaliação sobre as condições da ferida e as causas da infecção.

Para não reduzir a eficácia do Atrauman Ag, não utilizar em conjunto com pomadas ou parafina. O Atrauman Ag não deve ser usado em combinação com preparações que contenham iodo.

Armazenagem e transporte

Armazenar em posição horizontal em local seco e com uma temperatura inferior a 30°C.

Produto estéril até que seja aberto, não utilizar caso a embalagem esteja violada.

Não reesterilizar.

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores.

Esterilização: Radiação

Validade: 5 anos

Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha

Registro ANVISA: 80170310016

Farm. Resp.: Roseli Witzke Furstenu CRF - SP 10.308

Código	Tamanho do Curativo	Quantidade por caixa
499573	10 x 10 cm	10
499575-6	10 x 20 cm	10

HARTMANN

Rua Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 – 1º Andar

CEP 06460-040 – Tamboré – Barueri – SP

Telefone: (11) 3168-0226

comercial@hartmannbr.info - hartmann.info/pt-BR

