


HYDROCOLL

HYDROCOLL, HYDROCOLL SACRAL e HYDROCOLL THIN

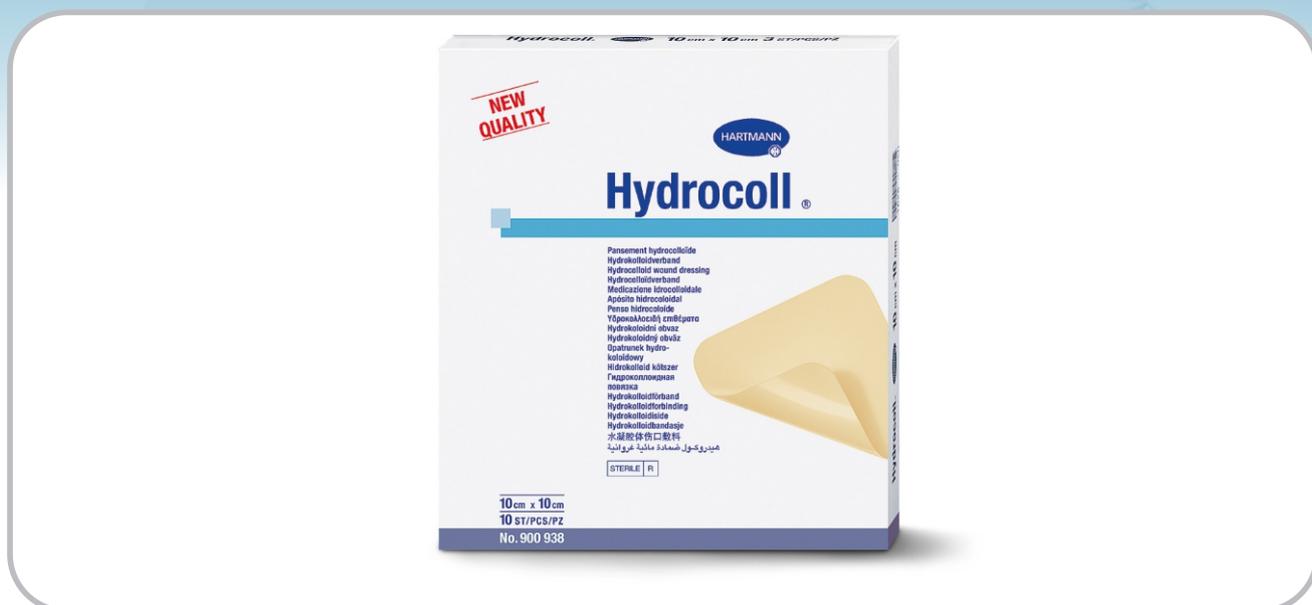

Descrição

O Hydrocoll é um curativo hidrocolóide absorvente, autoadesivo, coberto com um revestimento semipermeável para impedir a penetração bacteriana. Ao absorver o exsudato se transforma em gel e promove o meio úmido ideal para o processo de cicatrização.

Indicação

Hydrocoll é indicado para o tratamento de feridas com exsudato leve a moderado. Pode ser utilizado no tratamento de úlceras na perna, lesões por pressão, queimaduras de segundo grau e escoriações. Hydrocoll sacral possui um formato específico para o tratamento de lesões por pressão na região sacral; Hydrocoll Thin, deve ser utilizado preferencialmente durante a fase de epitelização.

Tempo de troca

Se não houver complicações o Hydrocoll pode permanecer até 7 dias na ferida.

Contra indicações

Não utilizar Hydrocoll em áreas ósseas, músculos e tendões, em feridas clinicamente infectadas, infecções provocadas por fungos ou em queimaduras de 3º grau.

Composição

Filme de poliuretano transparente, Carboximetilcelulose Sódica e Copolímero de Acrilato.

Apresentações

CÓDIGO	PRODUTO	TAMANHO	QUANTIDADE POR CAIXA
900938	HYDROCOLL	10x10 cm	10
900939	HYDROCOLL	15x15 cm	10
900940	HYDROCOLL	20x20 CM	10
900945	HYDROCOLL SACRAL	18x18 CM	10
900942	HYDROCOLL THIN	10x10 CM	10
900943	HYDROCOLL THIN	15x15 CM	10

Instruções de Uso

Escolher a melhor opção de Hydrocoll de acordo com a ferida. Hydrocoll/Hydrocoll Thin: retirar o papel de proteção, colocar o curativo e massagear levemente as bordas para auxiliar na adesividade do produto.

Hydrocoll Sacral: retirar o papel de proteção, colocar o curativo de acordo com o seu formato sacral e massagear levemente as bordas para auxiliar na adesividade do produto.

Através da absorção do exsudato forma-se um gel esbranquiçado visível externamente e formação de uma bolha. Em caso de fuga do exsudato, o curativo deverá ser trocado imediatamente. Para remover o Hydrocoll, levantar as bordas e tracionar lentamente para evitar lesões na pele perilesional.

Precauções

Manter fora do alcance de crianças. Não reesterilizar. Não utilizar caso a embalagem esteja danificada. Antes de cada tratamento da ferida com dificuldade de cicatrização é necessária uma avaliação médica da situação da ferida e das causas da dificuldade de cicatrização. O tratamento com Hydrocoll não substitui o tratamento da causa da dificuldade de cicatrização.

Armazenagem e transporte

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores. Armazenar em local seco e fresco, em temperatura máxima de 30°C e ao abrigo da luz solar direta.

Validade: 5 anos.

Fabricante: Paul Hartmann AG – Alemanha

Registro Anvisa: 80170310004

Esterilizado por radiação

Farm. Resp.: Roseli Witzke Furstenau CRF - SP 10.308

HARTMANN

Rua Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 – 1º Andar
CEP 06460-040 – Tamboré – Barueri – SP
Telefone: (11) 3168-0226
comercial@hartmannbr.info – hartmann.info/pt-BR

