

## Instruções de uso **P**

### Propriedades

Hydrofilm é um penso hipoalérgico auto-adesivo transparente indicado para o tratamento de feridas que favorece o processo de cicatrização ao criar um ambiente favorável. Hydrofilm protege a ferida de germenes patológicos, reduzindo assim o risco de infecções secundárias. A película semipermeável de poliuretano permite as trocas gasosas e de vapor de água. Devido à sua total transparência a ferida pode ser visualizada sem ser necessário remover o penso.

### Indicações

Hydrofilm emprega-se principalmente para cobrir e proteger feridas secas, não infectadas e com secreções escassas. Hydrofilm pode também ser usado como barreira à prova de água e de germenes cobrindo pensos absorventes ou para segurar cânulas ou catéteres.

### Contra-indicações

Hydrofilm não deve ser usado em feridas clinicamente infectadas, sangrantes ou altamente exsudativas.

### Modo de aplicação (Ver ilustrações)

Zonas da pele muito pilosas devem ser rapadas antes da aplicação do Hydrofilm.

### Outras informações

Conteúdo estéril, enquanto se mantiverem intactas as embalagens interiores. Conservar em lugar fresco e seco. Uso único. Não reesterilizar.

### Apresentações

Esterilizado, embalado individualmente.

6 x 9 cm	embalagem de 10 unidades embalagem de 100 unidades
10 x 15 cm	embalagem de 10 unidades embalagem de 50 unidades
12 x 25 cm	embalagem de 10 unidades embalagem de 30 unidades