

HYDROFILM I.V. e HYDROFILM I.V. CONTROL



Descrição

Hydrofilm I.V. é um curativo de filme de poliuretano transparente, estéril, autoadesivo, hipoalergênico, com alta permeabilidade ao vapor e impermeável a água e bactérias. Sua versão Control possui bordas reforçadas em tecido não tecido (poliéster) para uma fixação ainda mais segura, sem comprometer a pele.

Indicação

Fixação de cateteres periféricos em adultos e centrais em crianças e neonatos.

Composição

Filme de poliuretano com adesivo de acrilato. Versão Control: bordas de fibra de poliéster.

Apresentação

Curativos em tamanho 7 x 9 cm em caixas com 50 unidades. Produto estéril embalado individualmente.

Instruções de uso

Em regiões da pele com muito pêlos, deve-se realizar tricotomia. Não usar hidratantes ou soluções oleosas na pele antes da aplicação do filme. Aplicar sobre a pele seca e nunca em pele úmida.

Aplicação: retirar o adesivo de dentro do envelope individual, puxar parcialmente o papel protetor e o curativo no local. Retirar o restante do papel protetor e pressionar suavemente para fixação.

Remoção: retirar curativo tracionando as bordas de dentro para fora, apoiando com a mão o local onde o cateter esta inserido, até que o filme se desprenda totalmente. Atenção: Nunca puxar o filme diretamente, fazer a remoção tracionando as bordas para que não se corra o risco de causar lesões em pacientes com pele frável.

Precauções

Manter fora do alcance de crianças, não utilizar caso a embalagem esteja danificada. Uso único. Não reesterilizar

Tempo de troca do curativo

Pode permanecer por até 7 dias.

Armazenagem e transporte

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores. Armazenar em local seco e fresco, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar direta.

Esterilização: ETO

Validade: 5 anos

Fabricante: Paul Hartmann SA - Espanha

Registro ANVISA: 80170310060

Farm. Resp.: Roseli Witzke Furstenuau CRF - SP 10.308

HARTMANN

Rua Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 – 1º Andar
CEP 06460-040 – Tamboré – Barueri – SP
Telefone: (11) 3168-0226
comercial@hartmannbr.info – hartmann.info/pt-BR

