

TRICOTOMIZADOR MEDLINE



Descrição

Tricotomizador cirúrgico desenvolvido para atender integralmente as recomendações da AORN, SOBECC, SCIP e APECIH. Aparelho elétrico, sem fio, com bateria tipo NiMH lacrada, com dispositivo LED para indicação de carga que garante autonomia de 120 minutos. A limpeza é fácil e prática, graças ao aparelho ser lacrado podendo ser mergulhado ou limpo em substância desinfetante não corrosiva ou água e sabão. Após a limpeza deve ser seco antes de ser devolvido ao carregador. Pode ser colocado sobre uma superfície ou instalado na parede. Vem com kit de instalação.

Indicação

Remoção de pelos rente a pele sem danificar a camada córnea de proteção natural, prevenindo infecções de sítio cirúrgico e minimizando riscos.

Lâmina Universal Descartável - CINZA

Lâmina descartável em aço inoxidável, para tonsura de pelos distante da pele no mínimo 3mm, tipo universal compatível com tricotomizador elétrico. Pode ser usada seca ou molhada, para todos os tipos de pelo. Embalagem individual Blister, que garante a integridade. Caixa com 50 lâminas.

Lâmina para pelos espessos descartável - AZUL

Lâmina descartável em aço inoxidável, para tonsura de pelos distante da pele no mínimo 3mm, tipo pelos espessos (neurocirurgia/cardiovascular) compatível com tricotomizador elétrico. Pode ser usada seca ou molhada. Embalagem individual Blister, que garante a integridade. Caixa com 50 lâminas.

Lâmina para pelos finos e áreas sensíveis descartável - VERMELHA

Lâmina descartável em aço inoxidável, para tonsura de pelos distante da pele no mínimo 3mm, tipo pelos finos e áreas sensíveis compatível com tricotomizador elétrico. Pode ser usada seca ou molhada. Embalagem individual Blister, que garante a integridade. Caixa com 50 lâminas.

Apresentação

Kit composto por aparelho para tricotomia, carregador e lâminas.

Instruções de uso

Para recarregar: o tricotomizador cirúrgico é fornecido com uma carga limitada. Antes do uso, ele deverá ser carregado por 12 horas. Para recarregá-lo, coloque o carregador no adaptador de recarga. Certifique-se de que a luz indicativa está acesa. Uma bateria completamente descarregada exigirá 12 horas de tempo de carregamento completo. Quando o carregamento estiver concluído, a luz do status ficará verde. Recarregar a bateria além deste período de tempo não causará danos à mesma.

Para fixar as lâminas: certifique-se de que a chave liga/desliga está na posição "off". Alinhe a linha pequena no lado da lâmina do tricotomizador com a primeira (superior) linha pequena do suporte do tricotomizador. Encaixe a lâmina no suporte empurrando-a para baixo até que a linha desenhada na lâmina se alinhe com a segunda linha no tricotomizador, e você ouvirá um clique, sinal de que a lâmina está encaixada corretamente.

Para utilizar o Tricotomizador: a pele do paciente deverá estar

TRICOTOMIZADOR MEDLINE

limpa. Coloque a lâmina de acordo com as instruções. Coloque a chave liga/desliga na posição "on". Segure o corpo do tricotomizador de forma que o conjunto da lâmina esteja paralelo em relação à pele do paciente, e utilize movimentos curtos e suaves. Para melhores resultados, apare os pelos na direção oposta ao seu crescimento. Para as áreas mais difíceis, estique a pele enquanto aparar. Quando terminar, coloque a chave liga/desliga na posição "off". Remova a lâmina quando o tricotomizador não estiver em uso.

Para remover a lâmina: certifique-se de que a chave liga/desliga está na posição "off". Posicione o tricotomizador com a parte de metal da lâmina voltada para baixo, e a parte traseira do tricotomizador voltada para cima. Empurre a lâmina para liberá-la. Quando não estiver em uso, após a limpeza e secagem, coloque o tricotomizador no adaptador de carga de forma segura. As lâminas deverão ser utilizadas apenas uma vez.

Precauções

Utilize apenas com o carregador fornecido.

Não mergulhe ou armazene o carregador em água ou qualquer outro líquido.

Mantenha o carregador longe de superfícies aquecidas e não substitua o cabo de alimentação.

Sempre desconecte o carregador antes de fazer limpeza.

Caso um desempenho indesejável seja constatado, interrompa o uso do produto.

Dados técnicos do aparelho

Dados de Entrada: CA 100-240V 50-60 Hz 3W

Saída do Carregador/ Entrada do Tricotomizador: 3 Vc.c 100 mA

Tensão do motor: 2,4 Vc.c 100 mA

Modo de operação: operação contínua

Bateria: Ni-MH (AA600 mAh – 1,2 Vcc)

Apresentação das Lâminas

Código	Descrição	Símpro	Anvisa
DYND70800 - BR	Tricotomizador elétrico com carregador		80170319028
DYND70880	Lamina para tricotomizador - Universal - Cinza		80170319028
DYND70885	Lamina para tricotomizador - Espessos - Azul		80170319028
DYND70890	Lamina para tricotomizador - Finos - Vermelha		80170319028

Armazenagem e transporte

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores. Armazenar em local seco e fresco, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar direta.

Validade: Indeterminada

Fabricante: Medline Industries - USA